

...at et avtrykk
er optimalt er
ingen selvfølge.



Viscostat/Astringedent

Alt starter med tørlegging. Ved bruk av Viscostat eller Astringedent stoppes blødningen fullstendig. Du har all verdens tid til å legge tråden (for frilegging) og kan bruke opptil 20 minutter på avtrykkstagningen om nødvendig, uten stress, og uten risiko for blødninger.

Metal Dento-Infusor®

Dento-Infusor er nøkkelen til hele systemet **og må brukes riktig**. Dento-Infusor er en 19 gauge metallspiss med myk børste konstruert for å gi kontinuerlig applisering og infusjon av koagulerende hemostasevæsker (Astringedent/ViscoStat) imot og inn i blødende vev. Dette gir rask og komplett hemostase. Retraksjonen akseleres gjennom kontinuerlig infusjon av hemostase og retraksjonsvæske.

Ved riktig bruk er Dento-Infusor tannlegens beste instrument for komplett vevskontroll. Den er en helt nødvendig del i den anbefalte infusjonsteknikken ved vevskontroll.

Ultrapak® Cord


Ultrapak tråd er en strikket, uimpregnert retraksjonstråd i 100% bomull. Den unike, strikkede konstruksjonen trykkes forsiktig utover etter at tråden appliseres. Maskene åpner seg og tråden blir liggende i lommen. En strikket tråd holder og bærer vesentlig mer hemostatvæske enn konvensjonelle tråder.

Ultrapak tråd kan brukes til beskyttelse av gingiva **før** preparering, fordi tråden ikke setter seg fast i diamanten. En meget viktig egenskap ved bruk av før-preparasjons-teknikk. Den uimpregnerte Ultrapak tråden kan brukes i kombinasjon med alle typer væsker. I friskt vev kan vann være tilstrekkelig.

Klinisk teknikk


Tissue Management (vevskontroll)

Trinn 1: Hemostase

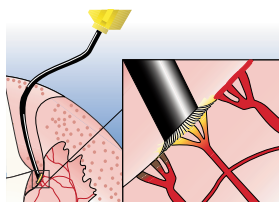

Preparer tannen. Fyll Plastic Syringe Luer Lock med ViscoStat eller Astringedent og gni med Dento-Infusor på det blødende gingiva ved å sakte presse ut ViscoStat/Astringedent. På denne måten overkommes trykket fra kapillarene og væsken presses ned i kapillåråpningene, og forsegling skjer med koagulering. Hold området fuktig for lettere å fjerne overskudd av koagel. Assistenten skal skylle lett hele tiden under vakuumsugingen slik at feltet holdes konstant rent. Dette minimerer også hard- og myktvevs kontakt med de ulike væskene. Kontroller fullstendig hemostase ved rengjøring av toveissprøyte med en relativ fast stråle. Oppstår en blødning, gjentas prosedyren.

Trinn 2: Frilegging

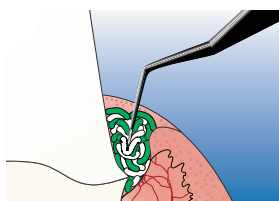

Appliser en Ultrapak tråd vætet med ViscoStat eller Astringedent. Velg en størrelse større enn vanlig retraksjonstråd da Ultrapak tråd komprimeres ved pakking. Det tynne pakkeinstrumentet synker inn i tråden (skader ikke gingiva) og fører med seg tråden ned i tannkjøtslommen i en hjerteform. Tråden er lett å pakke og blir på plass! Hjerteformen slår ut igjen til sirkel når pakkeinstrumentet fjernes og holder tråden i lommen med et lett trykk mot tann og tannkjøtt. Etter pakking, fjernes overskudd av ViscoStat eller Astringedent med luft/vann. Igjen reduserer dette de ulike midlenes kontakt med myk- og hardvev.

Trinn 3: Avtrykkstaking



Da tråden kun er lagt for å få en retraksjon, trenger den å ligge i kun 1–2 min. Fjern tråden og skyll med luft/vann. **Har prosedyren blitt gjort riktig skal ingen blødning oppstå.** Skulle det allikevel skje, gjenta prosedyren og skyll igjen. Skyll preparasjonen. Blås tørt og ta avtrykket.

Tissue Management for avtrykkstaking



Subgingival preparasjon og blødende sulcus.



ViscoStat/Astringedent gnis inn med Dento-Infusor på blødende gingiva.



Skyll godt med luft/vann for å fjerne koagel, sjekk at hemostase er fullstendig.



Tråd som er vætet i ViscoStat/Astringedent pakkes med Ultradent pakkeinstrument.



Etter pakking med tråd, skyll godt for å fjerne kjemikalier.



Fjern tråden og skyll godt. Alle kanter vaskes rene. Blås tørt.



Et kvalitetsavtrykk er sikret!

Kampanje

18071	Ultrapak Tissue Management 1 x tråd 00, 1, 2 og 3, 20 x Plastic Syringe Luer Lock, 1 x Viscostat 30 ml, 20 Metal Dento-Infusor Tips og gratis pakkeinstrument, verdi kr 488,-	kr 2.013,-	14731	ViscoStat® regular/mint 30 ml	kr 526,-
18075	Ultrapak Cord kit 1 x 00, 0, 1 og 2. Få med gratis Cord nr. 3, verdi kr 185,-	kr 713,-	18499	Astringedent®/Astringedent® X 30 ml	kr 526,-
18004	Ultrapak Cord packer	kr 488,-	18005	ViscoStat® Clear 30 ml	kr 525,-
			18055	Metal Dento-Infusor Tips 100 stk.	kr 1.213,-
			18077	1,2 ml Plastic Syringe Luer Lock 100 stk.	kr 632,-